

Rengöring rektoskopitillbehör - vårdhygienisk rutin

Syfte

Instrument och tillbehör som är avsedda för flergångsbruk måste rengöras och desinfekteras mellan användningarna med en metod som avdödar mikroorganismer.

Berörd verksamhet

Rutinen berör verksamheter och medarbetare som använder rektoskopiutrustning.

Ansvar

Alla som använder och rengör rektoskopitillbehör ska följa rutinen. Chefer på berörda verksamheter ansvarar för att rutinen är känd hos personalen.

Rengöring rektoskopitillbehör

Flergångstillbehören ska hanteras och förvaras så att renhetsgraden bibehålls fram till användning.

Ett vattenavvisande engångsfilter används mellan ballongen och rektoskophuvudet.

Tillbehör för flergångsbruk måste rengöras efter användning för att avlägsna organiskt material, som blod och vävnadsrester och annan smuts samt desinfekteras för att avdöda smittämnen.

Värmedesinfektion ska användas i första hand.

Ballong, rektoskophuvud samt ljuskabel

Alternativ 1. Maskinell rengöring och desinfektion:

- Avlägsna röret från instrumenthuvudet och filtret till luftpumpen och kassera det.
- Öppna instrumenthuvudets inspektionsfönster för bearbetningen och avlägsna svänglinsen.
- Lägg delarna i en korg och diska i diskdesinfektor.
- Efter avslutat program kan delarna torkas av med etanol 70% för att få dem torra.
- Ballongen hängs för att torka invändigt, gärna i torkskåp.

Alternativ 2. Manuell rengöring och desinfektion:

- Rengör delarna nedsänkta i neutralt rengöringsmedel och vatten, var särskilt noggrann vid håligheter, kanter och svåråtkomliga områden. Skölj i rinnande vatten,
- Torka torrt med ren engångsduk.
- Lägg de torra delarna i desinfektionslösning t ex. etanol 70% i 10 minuter alternativt Isopropanol 45% i 15 minuter.
- Ballongen hängs för att torka invändigt, gärna i torkskåp.

Kontrollera utrustningen avseende synliga föroreningar eller slitage. Upprepa rengöringen vid behov. Kassera om du inte kan avlägsna föroreningarna.

Tillhörande instrument exempelvis tänger, hemorrojdligator

- Öppna tänger och ta isär delbara instrument.
- Placera i en korg och diska i diskdesinfektor.
- Låt torka på ren plats efter avslutat program.

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2024-06-12	Nytt dokument	BL, P-ÅJ