

Rengöring av regionens transportstolar

Allmänt

För att förhindra indirekt kontaktsmitta är rätt utförd rengöring och desinfektion av hjälpmedel viktigt. Arbeta alltid utifrån basala hygienrutiner och använd skyddsutrustning såsom handskar, plastförkläde och stänkskydd vid behov.

Oavsett känd smitta eller inte ska hjälpmedlet rengöras och desinfekteras enligt nedanstående.

Punktrensning

- Punktrensning utförs direkt vid spill, förorening av kroppsvätskor/utsöndringar eller synlig smuts. Till rengöring av rullstolar används fuktad mikrofiberduk alternativt rengöringsmedel och vatten.
- Mekanisk rengöring är viktig för att ta bort smuts och biofilm på ytor.

Punktdesinfektion

Utförs direkt vid förorening vid spill, förorening av kroppsvätskor/utsöndringar eller synlig smuts. Rengör först med fuktad mikrofiberduk alternativt rengöringsmedel och vatten.

Desinfektera därefter med ytdesinfektion.

Desinfektera handtag samt sittyta och ryggstöd efter användning.

Daglig rengöring och desinfektion

- Om ytan är synligt ren kan man använda enbart vårt vanliga desinfektionsmedel som även innehåller en rengörande tensid.
- Rengöring görs av hela rullstolen med fuktad mikrofiberduk alternativt rengöringsmedel och vatten.
- Desinfektera därefter med ytdesinfektion.

Ändringshistorik

| Datum | Ändring | Utförd av |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 2024-09-10 | Dokumentet upprättas. | CJ, BL, EP, SC, EHL |