

Desinfektion av visir och skyddsglasögon

När dessa inte används ska de förvaras på ren plats dvs. i skåp eller upphängda på krok.

Rutin för desinfektion:

1. Desinfektera händer och underarmar
2. Ta på handskar och ärmlöst plastförkläde och behåll det på under hela rengöringsprocessen
3. Desinfektera visiret/skyddsglasögonen med ytdesinfektion. Desinfektera insidan först, därefter utsidan. Torkduk/papper byts mellan momenten.
4. Placera visiret/skyddsglasögonen på en ren yta eller häng på en krok så de kan torka.
5. Ta av handskarna
6. Desinfektera händer och underarmar
7. Ta av plastförklädet
8. Desinfektera händer och underarmar
9. När visiret/skyddsglasögonen torkat är det klart att använda igen

Produkterna kan användas så länge de är hela och sikten genom är klar.

Visir/skyddsglasögon som inte är godkända att använda som flergångs enligt Arbetsmiljöverket ska inte återanvändas.

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2021-01-19	Dokumentet ersätter tidigare "Återanvändning av skyddsutrustning version 3".	Vårdhygien (SC, BL, CJ)